

Qvintip® Bruksanvisning

– Självprovtagning för HPV-analys

Qvintip

Qvintip är en provtagare som du själv använder för att ta ett prov från slidan. Provet skickar du med post till vårt laboratorium för HPV-analys. Inom 2-3 veckor kommer provsvaret till din brevlåda.

Varför ska jag ta ett HPV-test?

En bestående HPV-infektion av högrisk-typ kan över tid leda till cellförändringar som i sin tur kan utvecklas till livmoderhalscancer.

Allmän information

Analysen av ditt prov visar om du bär på högrisk-HPV eller inte. Den ger även specifikt svar på om du bär på HPV-typerna 16 och 18. Dessa står för ca 70 % av all livmoderhalscancer. En infektion med typ 16 och 18 innebär att tätare kontroller än normalt rekommenderas.

HPV-negativt provsvar

Om provet är negativt har du ingen HPV-infektion av högrisk-typ just nu och därmed finns heller ingen risk för livmoderhalscancer för närvarande. Vi rekommenderar att du tar ett nytt HPV-test inom 3-5 år.

HPV-positivt provsvar

Om provet visar att du har en HPV-infektion av högrisk-typ, uppmanas du att kontakta en gynekolog för att planera för framtida åtgärder. Fyra av fem kvinnor smittas någon gång i sitt liv av HPV och i de allra flesta fall läker infektionen ut av sig själv.

Viktigt att notera


- Qvintip ska hanteras varsamt och endast användas enligt dessa instruktioner.
- Den vita toppen ska ej avlägsnas innan provtagning.
- Använd inte Qvintip under menstruation.
- Observera att Qvintip är tillverkad för engångsbruk.
- Det är lämpligt att avstå från samlag och användning av vaginalkrämer, vagitorier, vaginalgeler och slidtabletter i 48 timmar före provtagning.
- Provtagning kan utföras under de tre första månaderna av en graviditet.
- Provhandlingen är sekretesskyddad och provet sparas inte.
- Personuppgifter hanteras i enlighet med GDPR.
- Förvaras utom räckhåll för barn.

Material

- Qvintip självprovtagare
- Provrör
- Återförslutningsbar påse
- Förfrankerat returkuvert

Så här tar du provet

Kontrollera att produkten är intakt. Provtagarens topp, den vita delen, ska vara fastsatt och inte vinklad mot den blå delen. Toppen får inte vinklas eller lösgöras före provtagningen. Provtagning kan utföras i stående eller liggande ställning. Förbered provtagning genom att tvätta händerna och ta av korken på röret. Lägg rör och kork åt sidan.

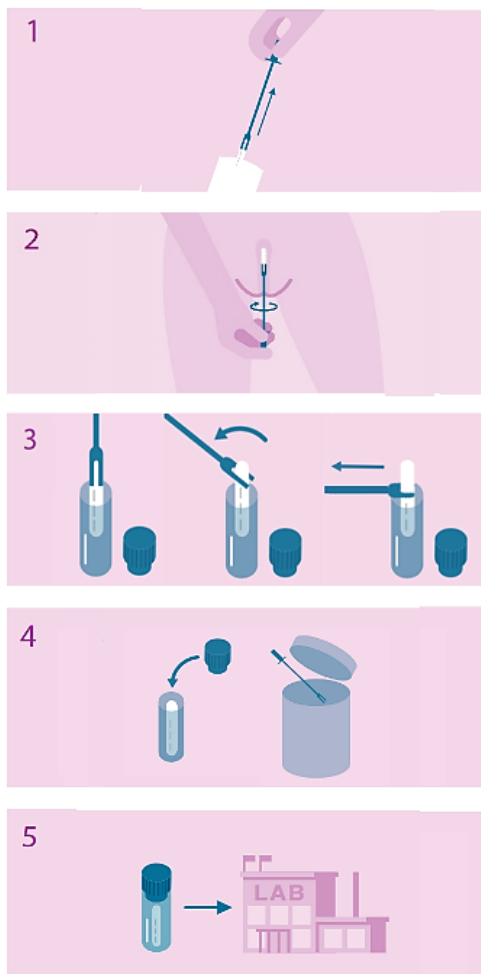

1. Öppna förpackningen enligt markerad linje och ta ur provtagaren genom att hålla i det blå handtaget. Håll provtagaren rak. Var försiktig så att den vita toppen ej vidrör något.
2. För in provtagaren i slidan tills dess du känner att den har nått botten (ca 10 cm)
 - a. Roterä provtagaren 5 hela varv.
 - b. För ut provtagaren rakt utåt.
3. Håll provtagaren i en hand och provröret i den andra. För ner provtagaren i röret så att den vita toppen är inuti röret så långt ner som bilden visar. Vinkla provtagaren tills det blå handtaget vidrör mynningen på röret. Dra långsamt bort handtaget från röret så att den vita toppen lösgörs och faller ner i röret.
4. Sätt korken på provröret och kasta den blå delen av provtagaren. Denna del sorteras som plast.
5. Lägg provröret i den medföljande återförslutningsbara påsen. Lägg den återförslutningsbara påsen i returkuvertet. Förslut kuvertet och lägg kuvertet i en brevlåda snarast efter provtagning.

Har du frågor om provtagningen, Qvintip eller HPV?

Gå in på vår hemsida www.aprovix.com och se om du hittar svaret under FAQ. Hittar du inte svaret på din fråga, skicka oss ett meddelande på swe.aprovix.com/kontakta-oss.

Tack för att du använder Qvintip!

Rapportering av allvarliga incidenter

Om en allvarlig incident inträffar under användandet av denna produkt skall detta rapporteras till tillverkaren samt till Läkemedelsverket. Genom att rapportera incidenter hjälper du till med ny information som kan användas för att utveckla säkerheten för denna produkt.



Läs instruktionerna innan användning



Endast för engångsbruk



Utgångsdatum, se förpackning



LOT/batch nummer, se förpackning



Tillverkad i Sverige

© Copyright 06/2020 Aprovix AB | IFU Article no. 10-050

Aprovix AB, Birger Jarlsgatan 57 C, 113 56 Stockholm, Sweden
info@aprovix.com, www.aprovix.com